







Vijf producten voor een adequate wondgenezing:

Debrisoft®, Suprasorb® C, Suprasorb® A Ag, Suprasorb® P sensitive, Vliwasorb® Pro

		T	I	M	E
		Tissue	Infection	Moisture	Edge
Vocht hoeveelheid	Debridement	Niet vitaal weefsel	Gecontamineerd / infectie	Vochtbalans	Wondrand
	Debrisoft Pad of Debrisoft Lolly	Suprasorb C Suprasorb P sensitive	Suprasorb A Ag of Suprasorb P PHMB	Suprasorb P sensitive	
		Suprasorb C Suprasorb P sensitive	Suprasorb A Ag of Suprasorb P PHMB	Suprasorb P sensitive	
		*Suprasorb P sensitive of Suprasorb C + **Vliwasorb Pro	*Suprasorb A Ag	**Vliwasorb Pro	Suprasorb C 2 tot 3 maal per week verwisselen
		*Suprasorb P sensitive of Suprasorb C + **Vliwasorb Pro	*Suprasorb A Ag	**Vliwasorb Pro	Suprasorb C 2 tot 3 maal per week verwisselen

Bij chronisch oedeem (mits enkel-arm index goed is) kunt u voor de compressietherapie kiezen uit: Actico UlcerSys / Rosidal TCS / Elko Compressie box

* Bij ernstig onderliggend lijden en/of zeer ernstige wonden altijd een arts of verpleegkundige specialist raadplegen (WEC)

** Voor het fixeren van de Vliwasorb Pro kunt u Suprasorb F op rol gebruiken of Mollelast fixatiewindsel



Top 5 Wondbedpreparatie en Wondbehandeling

TIME	Product	WCS	Afmeting (cm)	Artikelnr.	Z-Indexnr.
Debridement	Debrisoft Pad	■ ■ ■	10 x 10	34 321	156 687 62
	Debrisoft Lolly	■ ■ ■	5 x 1,9	33 224	161 871 56
Tissue	Suprasorb C	■ ■ ■	4 x 6	20 481	145 558 08
	Suprasorb P sensitive border	■ ■ ■	10 x 10	139 061	167 957 68
	Vliwasorb Pro	■ ■ ■	12,5 x 12,5	32 641	162 764 69
Infection	Suprasorb A AG	■ ■ ■	10 x 10	20 571	151 834 75
	Suprasorb P PHMB	■ ■ ■	10 x 10	34 542	163 467 69
Moisture	Suprasorb P sensitive border	■ ■ ■	10 x 10	139 061	167 957 68
	Suprasorb P sensitive silicone border lite	■ ■ ■	10 x 10	139 083	167 958 57
	Vliwasorb Pro	■ ■ ■	12,5 x 12,5	32 641	162 764 69
Edge	Suprasorb C	■ ■ ■	4 x 6	20 481	145 558 08
Fixatie	Suprasorb F op rol niet steriel	□ □ ■	10 m x 10 cm	20 468	14815567

Een zwarte (necrotische) wond eerst debrideren alvorens de producten toe te passen.

Meer informatie over ons uitgebreide assortiment wondzorg-producten vindt u op onze website.

- necrotische wonden ■ fibrineuze wonden
- granulerende wonden ■ epitheliserende wonden

