



People.Health.Care.

Curafix® i. v. **NIEUW**

Voor elke toegang de juiste oplossing.

Voor PVK
en CVK



Samen met u ontwikkeld:



De Curafix® i. v. -fixaties.

Compact assortiment, veelzijdig gebruik.

De Curafix® i. v. -fixaties.


Voor elke punctieplaats de juiste bescherming.

Uit de praktijk voor de praktijk:


 **Met contrafixatie** voor betrouwbare fixatie*


 **Goede zichtcontrole van de punctieplaats** voor langere intervallen tussen verbandwisselingen†


 **Geoptimaliseerde afmetingen** voor vele toepassingsgebieden, bv. pediatrie

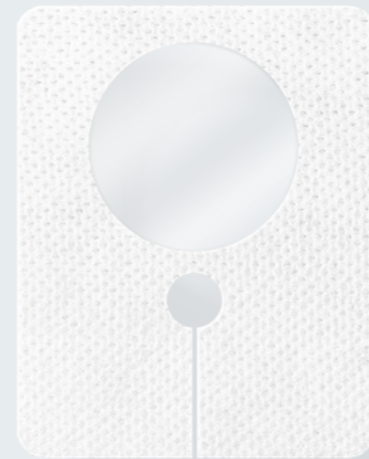


 **Curafix i.v. Control** NIEUW
6 x 7,5 cm voor PVK

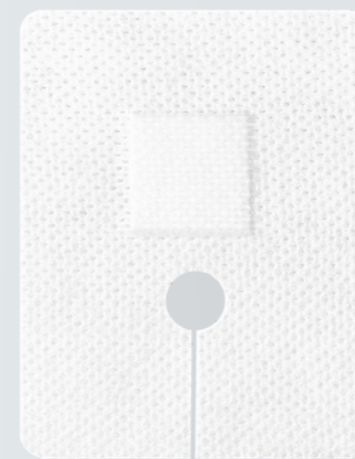

 **Curafix i.v. Soft** NIEUW
6 x 7,5 cm voor PVK

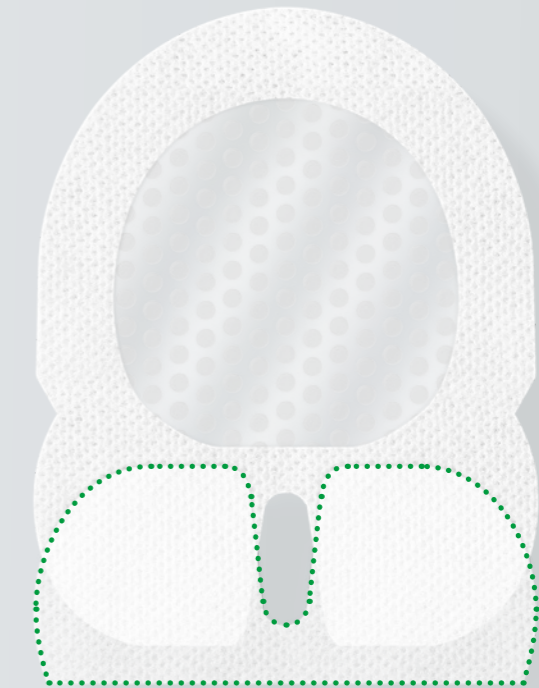


 **Curafix i.v. Control** NIEUW
9 x 11 cm voor CVK

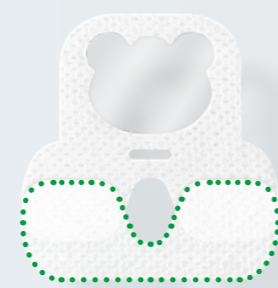


 **Curafix i.v. Junior** NIEUW
4,3 x 5 cm voor PVK

Curafix i. v. serie

 **Curafix i.v. Film** NIEUW
6 x 7 cm voor PVK

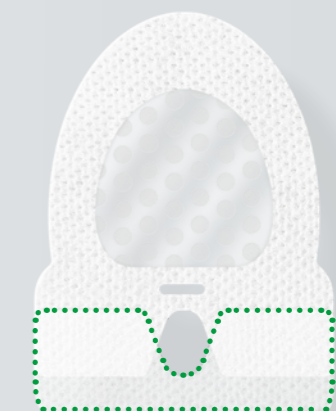

 **Curafix i.v. Control** NIEUW
5,5 x 6,5 cm voor PVK

 **Curafix i.v. Film** NIEUW
10 x 12 cm voor CVK

Wist u dit al?


Het Duitse Robert Koch-Institut (RKI) beveelt het gebruik van gaas- en folieverbanden aan*, omdat:

- deze een goede bescherming tegen vocht van buiten bieden
- de pleisters over het algemeen één keer per week verwisseld hoeven te worden

Curafix® i. v. Junior **NIEUW**

Beresterk design voor de jongste patiënten.

Het qua oppervlak kleinste product op de markt

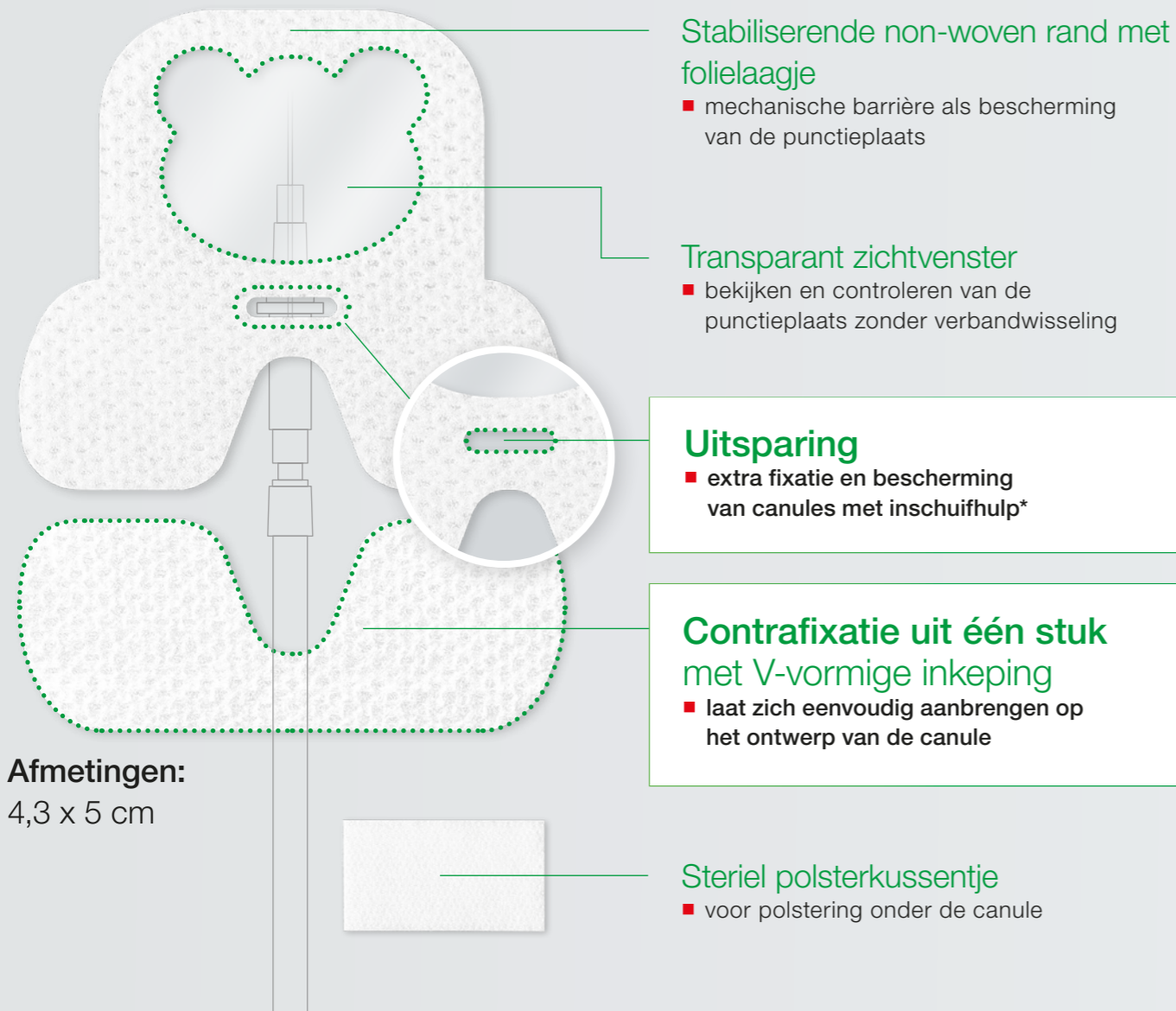

Afmetingen:
4,3 x 5 cm

Gebruik:
voor PVK

Geschikt voor:
alle gangbare canulesoorten

Curafix® i. v. Junior **NIEUW**

Uw voordelen in één oogopslag:

Eigenschappen:

- contrafixatie
- uitsparing
- bevat geen latex
- laat geen water door

Voordelen:

- individuele aanpassing aan de canule mogelijk
- extra trekkraftontlasting
- huidvriendelijk*
- afwasbaar met desinfectiemiddelen**

Toepassing:



Stap 1:
Voor polstering legt u het bijgeleverde polsterkussentje onder de canule.



Stap 2:
Trek het grote afdekpapier waarop de contrafixatie is aangebracht, er af.



Stap 3:
Leg de pleister met de V-vormige inkeping om de canule; **Tip:** canules met inschuifhulp kunnen bovendien met de uitsparing gefixeerd worden.



Stap 4:
Trek het afdekpapier er af en druk de pleister aan.



Stap 5:
Breng de contrafixatie aan om de canule en trek het lipje er af.



Stap 6:
Strijk de pleister met de contrafixatie over het gehele oppervlak glad en druk de pleister aan.


Scan de QR-code om de toepassingsvideo te bekijken.
Maar u kunt ook onze website op www.Lohmann-Rauscher.com bezoeken.




Curafix® i.v. Control **NIEUW**

De slimme oplossing voor wat betreft vorm en afmetingen.

Met
innovatieve
contrafixatie

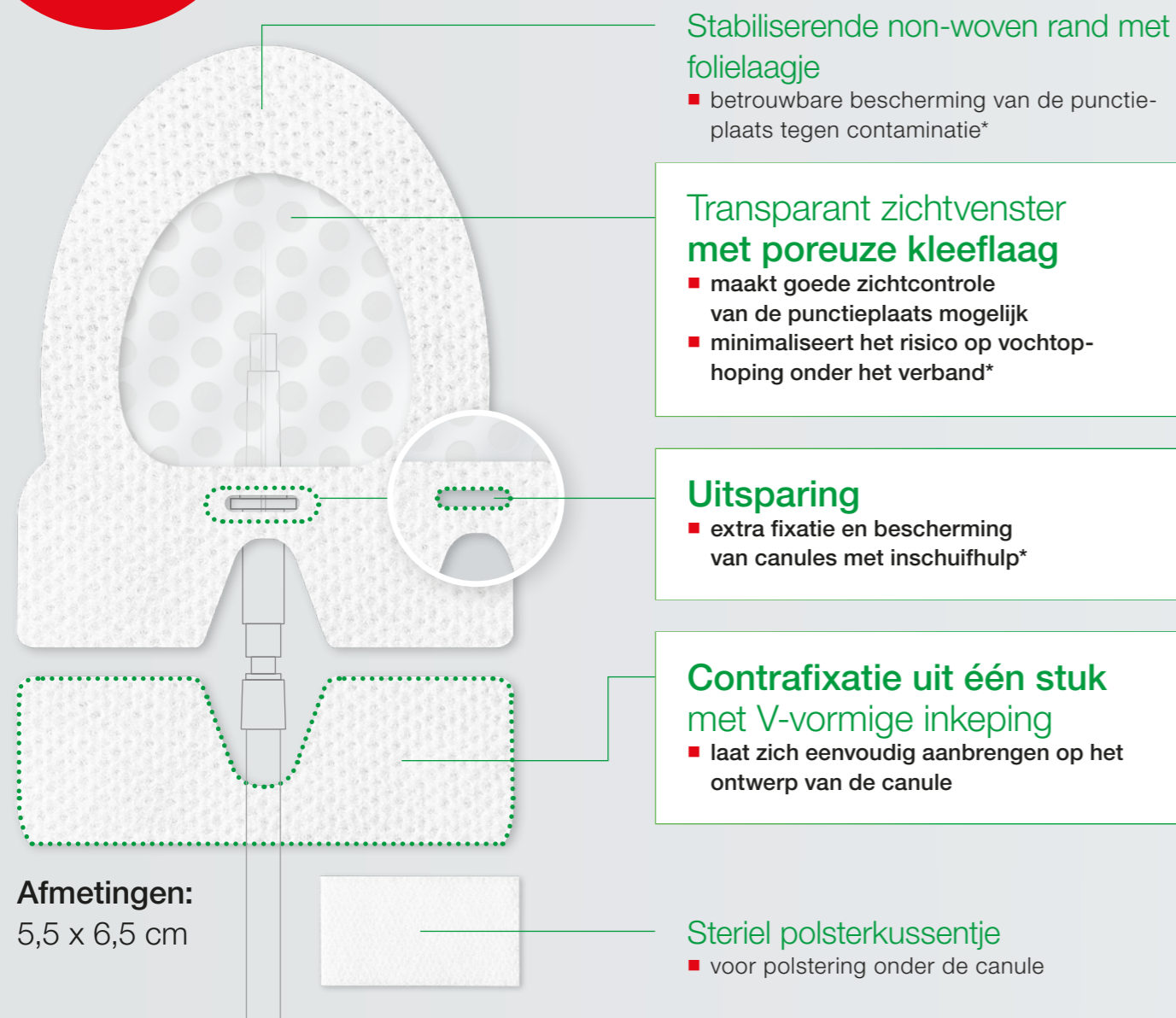




 Gebruik:
voor PVK

Geschikt voor:
alle gangbare canulesoorten

Curafix® i.v. Control **NIEUW**

Uw voordelen in één oogopslag:

Eigenschappen:

-  transparant zichtvenster
-  hoge waterdampdoorlatendheid
-  contrafixatie
-  ergonomisch model

Voordelen:

- langere intervallen tussen verbandwisselingen door controle van de punctieplaats¹
- laag maceratie-risico*
- veilige fixatie van de canule*
- blijft betrouwbaar plakken op de huid*

Toepassing:



Stap 1:
Voor polstering legt u het bijgeleverde polsterkussentje onder de canule.



Stap 2:
Trek het grote afdekpapier waarop de contrafixatie is aangebracht, er af.



Stap 3:
Leg de pleister met de V-vormige inkeping om de canule. **Tip:** canules met inschuifhulp kunnen bovendien met de uitsparing gefixeerd worden



Stap 4:
Trek het afdekpapier er af en druk de pleister aan.




Stap 5:
Breng de contrafixatie aan om de canule en trek het lipje er af.



Stap 6:
Strijk de pleister met de contrafixatie over het gehele oppervlak glad en druk de pleister aan.


Scan de QR-code om de toepassingsvideo te bekijken.
Maar u kunt ook onze website op www.Lohmann-Rauscher.com bezoeken.

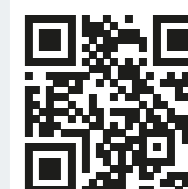

Curafix® i.v. Control **NIEUW**

De oplossing voor katheters met één lumen of meerdere lumina.

Duidelijk zicht,
minder
verbandwisse-
lingen

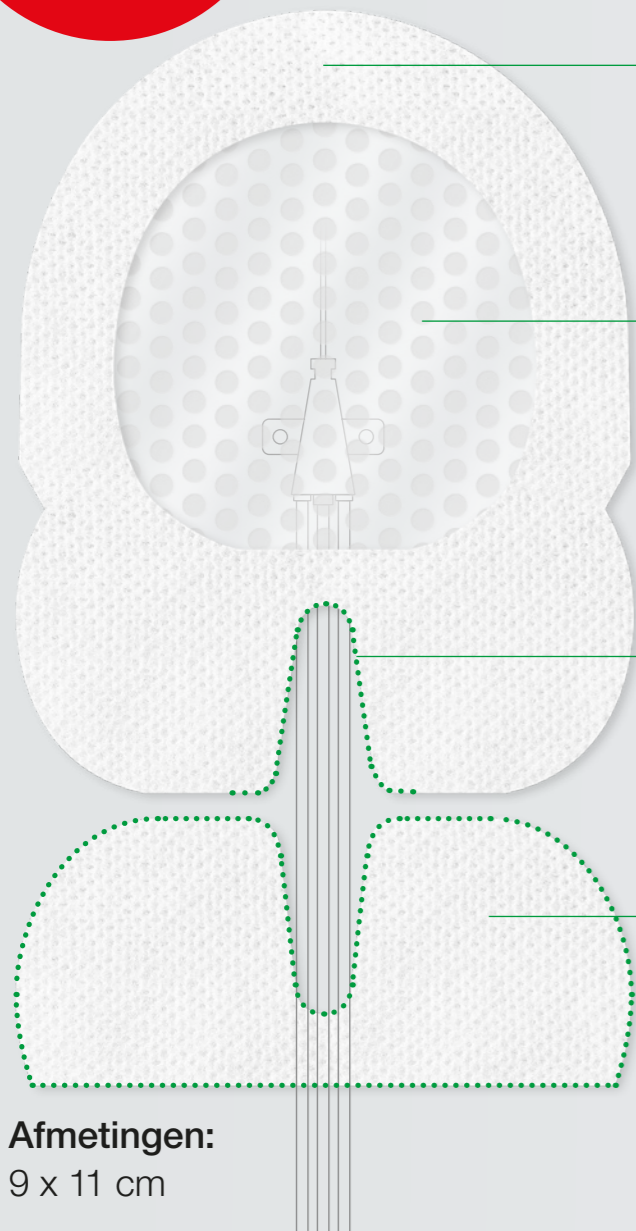

Stabiliserende non-woven rand met folielaagje

- betrouwbare bescherming van de punctieplaats tegen contaminatie*
- blijft goed plakken op de huid*

Transparant zichtvenster met poreuze kleeflaag

- sterk ademende folie minimaliseert het risico op maceratie*
- maakt bekijken en controleren van de punctieplaats mogelijk

V-vormige lange inkeping

- maakt uittreden van katheters met één lumen of meerdere lumina mogelijk

Contrafixatie uit één stuk met V-vormige inkeping

- laat zich individueel aanpassen aan het ontwerp van katheters met één lumen of meerdere lumina

Afmetingen:
9 x 11 cm

Gebruik:
voor CVK

Geschikt voor:
katheters met één lumen of meerdere lumina

Curafix® i.v. Control **NIEUW**

Uw voordelen in één oogopslag:

Eigenschappen:

 ademende folie

 soepel non-woven materiaal

 poreuze lijmlaag

 röntgentransparant

Voordelen:

hoge waterdampdoorlatendheid

past zich aan de contour van lichaamsdelen, en aan canules en katheters aan

minimaliseert het risico op vocht-ophoping onder het verband*

controle van de katheterplaats mogelijk

Toepassing:



Stap 1:

Trek het grote afdekpapier waarop de contrafixatie is aangebracht, er af.



Stap 2:

Leg de pleister met de V-vormige inkeping om de katheter of het lumen zodat de punctieplaats afgedekt wordt met het zichtvenster.



Stap 3:

Trek het afdekpapier er af en druk de pleister aan.



Stap 4:


Breng de contrafixatie aan om de katheter of het lumen, en trek het lipje er af.



Stap 5:

Strijk de pleister met de contrafixatie over het gehele oppervlak glad en druk de pleister aan.


Scan de QR-code om de toepassingsvideo te bekijken.
Maar u kunt ook onze website op www.Lohmann-Rauscher.com bezoeken.

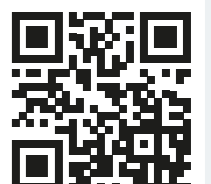

Curafix® i. v. Control **NIEUW**

Eenvoudige controle zonder verbandwisseling.

Ingestanste opening voor injectiepoort

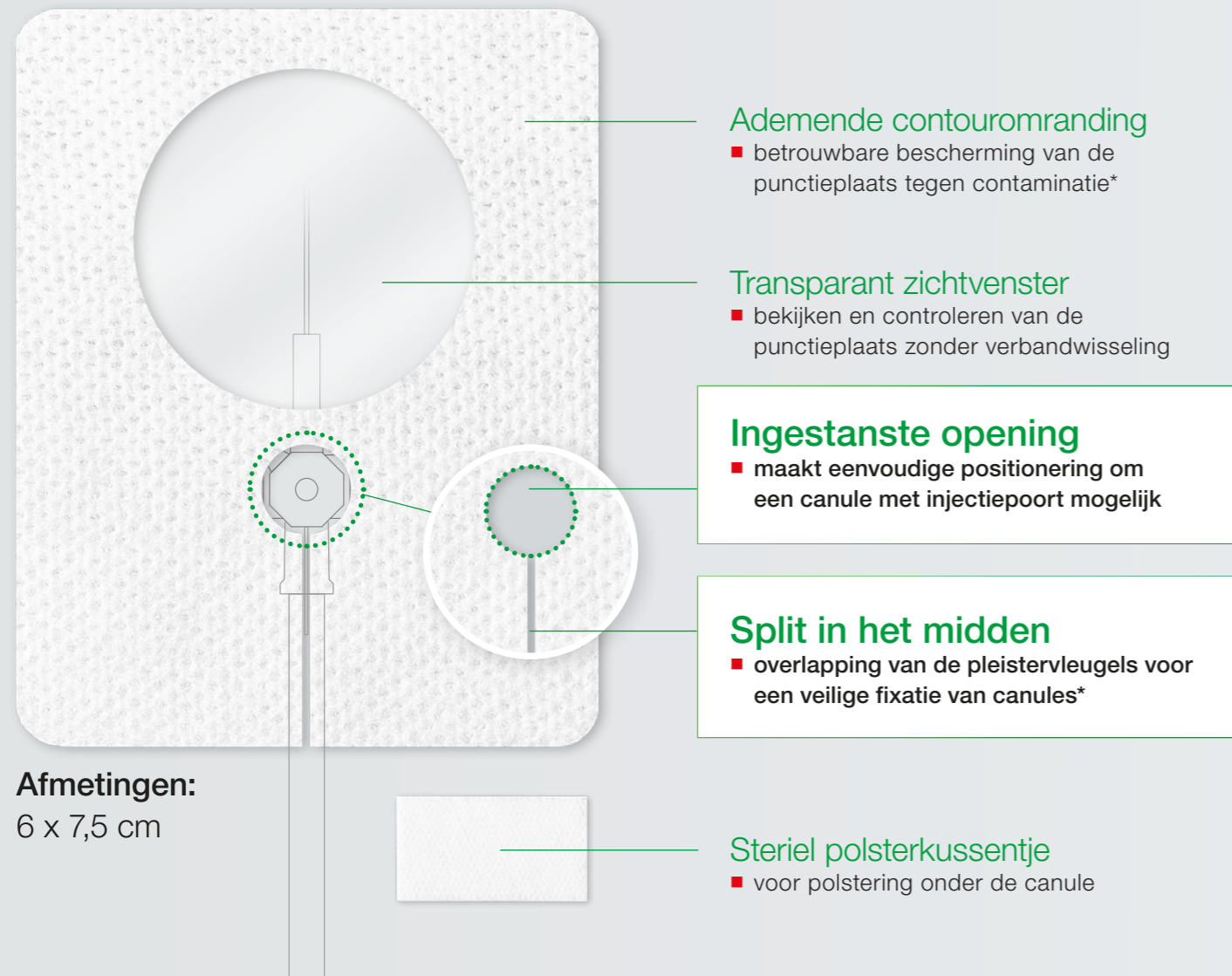

Gebruik:
voor PVK

Geschikt voor:
canules met vleugels en injectiepoort

Curafix® i. v. Control **NIEUW**

Uw voordelen in één oogopslag:

Eigenschappen:

- transparant zichtvenster
- ademende folie
- laat geen water door
- pleister kan zonder resten worden verwijderd

Voordelen:

- langere intervallen tussen verbandwisselingen door controle van de punctieplaats¹
- kiem- en bacteriewerend
- geschikt voor douchen*
- huidvriendelijk**

Toepassing:



Stap 1:
Voor polstering legt u het bijgeleverde polsterkussentje onder de canule.




Stap 2:
Trek het grote afdekpapier aan de achterkant weg.



Stap 3:
Leg de pleister met de ronde inkeping om de injectiepoort en het zichtvenster op de punctieplaats.




Stap 4:
Trek de kleine afdekpiertjes van de vleugels af en breng de vleugels overlappend aan.

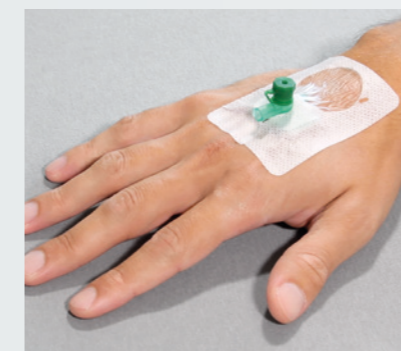

Stap 5:
Strijk de pleister over het gehele oppervlak glad en druk de pleister aan.


Scan de QR-code om de toepassingsvideo te bekijken.
Maar u kunt ook onze website op www.Lohmann-Rauscher.com bezoeken.

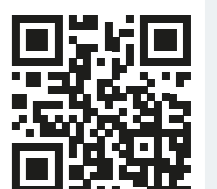

Curafix® i.v. Soft **NIEUW**

Gecomprimeerd model, eenvoudig te positioneren.

Ingestanste opening voor injectiepoort

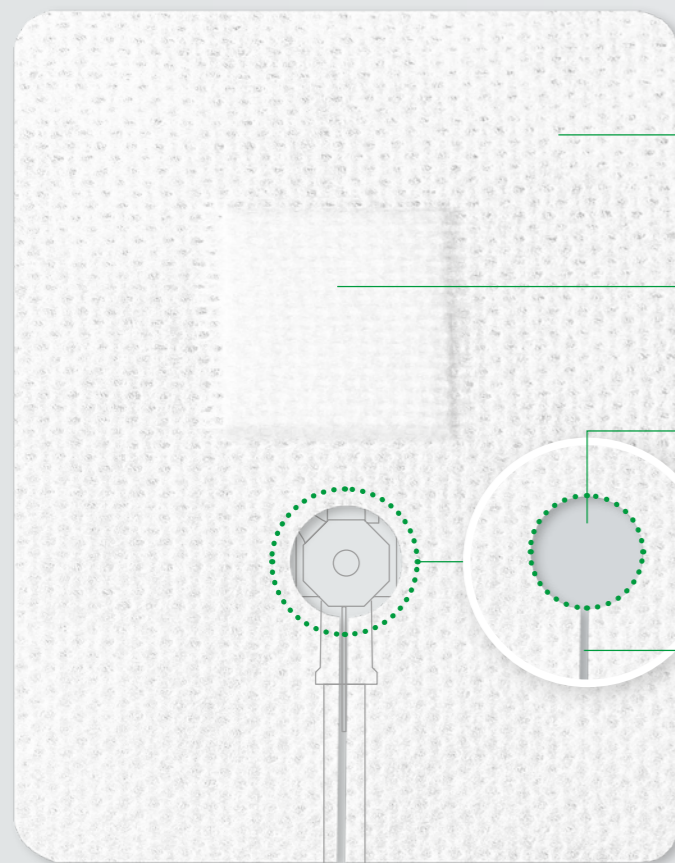


Ademend non-woven materiaal
■ hoge waterdampdoorlatendheid

Wondkussen
■ opname van bloed en exsudaat*

Ingestanste opening
■ maakt eenvoudige positionering om een canule met injectiepoort mogelijk

Split in het midden
■ overlapping van de pleistervleugels voor een veilige fixatie van canules*

Afmetingen:
6 x 7,5 cm

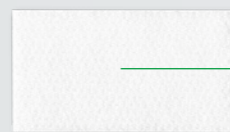

Steriel polsterkussentje
■ voor polstering onder de canule



Gebruik:
voor PVK

Geschikt voor:
canules met vleugels en injectiepoort

Curafix® i.v. Soft **NIEUW**

Uw voordelen in één oogopslag:

Eigenschappen:

 afgeronde hoeken

 rekbaar non-woven materiaal

 soepel

 bevat geen latex

Voordelen:

goede en betrouwbare fixatie op de huid*

omsluiting van de canule door overlappend plakken van de pleistervleugels

past zich aan de contour van lichaamsdelen aan

huidvriendelijk**

Toepassing:



Stap 1:
Voor polstering legt u het bijgeleverde polsterkussentje onder de canule.



Stap 2:
Trek het grote afdekpapier aan de achterkant weg.



Stap 3:
Leg de pleister met de ronde inkeping om de injectiepoort en dek de punctieplaats met het wondkussen er af.



Stap 4:
Trek de kleine afdekpiertjes van de vleugels af en breng de vleugels overlappend aan.



Stap 5:
Strijk de pleister over het gehele oppervlak glad en druk de pleister aan.

Scan de QR-code om de toepassingsvideo te bekijken.
Maar u kunt ook onze website op www.Lohmann-Rauscher.com bezoeken.



Eenvoudig aan te brengen

- vereenvoudigt het opbrengen van de dunne folie
- kan zeer goed in model worden gebracht bij canules en katheters

Elastische transparante folie

- bekijken en controleren van de punctieplaats zonder verbandwisseling
- kan zonder resten worden verwijderd*

Inkeping

- omsluit de vleugels van de canule met injectiepoort
- probleemloze toegang tot de Luer-Lock-aansluiting

Afmetingen: 10 x 12 cm voor CVK

Afmetingen: 6 x 7 cm voor PVK

Afmetingen: 6 x 7 cm, met inkeping voor PVK

Gebruik:
voor PVK
en CVK

Geschikt voor:
alle gangbare canulesoorten
katheters met één lumen of meerdere lumina

Uw voordelen in één oogopslag:

Eigenschappen:

-  soepele folie
-  röntgentransparant
-  laat geen water door
-  kan zonder resten worden verwijderd*

Voordelen:

- past zich aan de contour van lichaamsdelen, en aan canules en katheters aan
- controle van de katheterplaats mogelijk
- betrouwbare bescherming tegen contaminatie*
- huidvriendelijk**

Toepassing:



Stap 1:
Trek de lipjes van beide afdekpapiertjes helemaal uit elkaar.



Stap 2:
Plaats het folieverband met de zelfklevende kant centraal over de punctieplaats.



Stap 3:
Druk de folie over het hele oppervlak zodanig aan dat katheterslangen ook worden gefixeerd.



Stap 4:
Trek de lipjes van de steunrand over de al opgeplakte folie af.





Stap 5:
Strijk de folie over het gehele oppervlak glad en druk de folie aan.

CVK

PVK

PVK CUT

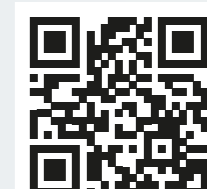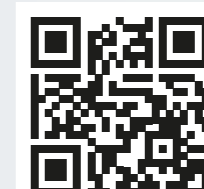

Scan de QR-code om de toepassingsvideo te bekijken.
Maar u kunt ook onze website op www.Lohmann-Rauscher.com bezoeken.



People.Health.Care.

Curafix® i. v. **NIEUW**

Bestelinformatie voor perifeer veneuze toegangen (PVK)



Product	Productafbeelding	Afmetingen (cm)	REF	ZI	CNK	VE (stuks)
Curafix i. v. Junior		4,3 x 5	31 883	16972996	3738382	100/600
Curafix i. v. Control		5,5 x 6,5	31 886	16977068	3738416	100/400
Curafix i. v. Control		6 x 7,5	33 697	16972988	3738408	50/400
Curafix i. v. Soft		6 x 7,5	33 696	16965965	3738390	50/400
Curafix i. v. Film		6 x 7	31 884	16977084	3738432	100/500
Curafix i. v. Film		6 x 7	33 699	16977092	3738440	100/500

voor centraal veneuze toegangen (CVK)

Product	Productafbeelding	Afmetingen (cm)	REF	ZI	CNK	VE (stuks)
Curafix i. v. Control		9 x 11	34 870	16977076	3738424	50/600
Curafix i. v. Film		10 x 12	31 885	16977114	3738457	50/500

Referenties:

1) Robert Koch-Institut (RKI): Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen (Teil1); Bundesgesundheitsblatt; Springer-Verlag Berlin/Heidelberg 2017.