













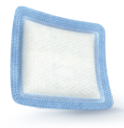


Professioneel beheer van wonden - speciale steriele kompressen

	Debrisoft®	Vliwasorb® Sensitive	Vliwasorb Pro®	Vliwazell®	Vliwazell Pro®	Vliwaktiv®	Vliwaktiv® Ag	Stellaline®	Metalline®	Lomatuell® Pro	Lomatuell® H
	Monofilament fiber pad	Superabsorberend verband	Super absorberend verband	Absorberend kompres	Absorberend kompres	Kompres met actieve kool	Antimicrobieel verband met actieve kool	Niet klevend kompres	Meerlagig speciaal kompres	Gelvormend contactnetwerk	Zalftule
											
	Monofilamentvezels pad voor eenvoudig, efficiënt en bijna pijnloos debridement	Zeer hoge absorptie en retentievermogen. Met silicone wondcontactlaag. Vormvastheid en eenvoudig in het gebruik.	Zeer hoge absorptie en retentievermogen, met brede randen, ergonomisch en met kledingbeschermende laag.	Zeer absorberend, polsternd, met kleding beschermlaag	Zeer hoge absorptiecapaciteit, stabiel vormbehoud en eenvoudig gebruik	Vermindert geur, polsternd, met kleding bescherming	Vermindert geur, polsternd, met kleding bescherming	Preventie van verontreiniging uit externe bronnen	Vacuümmetallisatie	Opbouw van een laagje gel van vaseline en hydrocolloïdeeltjes bij contact met wondexsudaat, aan beide zijden te gebruiken	Met witte vaseline geïmpregneerd
	- Met afgeschuinde vezeluiteinden voor zeer efficiënte resultaten - Zachte en dichte vezelstructuur voor een zachte toepassing - Reeds ingegroeid granulatieweefsel en epitheel worden ontzien, de genezing van de wond wordt gestimuleerd.	Acute en chronische, matig tot sterk exsuderende wonden. B.v. Dehiscente postoperatieve wonden, Ulcus cruris, Diabetische voetulcers, Decubitus. Geschikt voor gebruik onder compressie	Acute en chronische wonden. Voor matig tot sterk exsuderende wonden. Geschikt voor gebruik onder compressie. Vliwasorb Adhesive: voor fixatie van wondbedekking op verbandtechnisch moeilijke plekken	Matig tot sterk exsuderende wonden. Universeel gebruik.	Acute en chronische, matig tot sterk exsuderende wonden. B.v. brandwonden, postoperatieve wonden, arteriële en veneuze ulcers, oncologische en lymfatische wonden. Geschikt voor gebruik onder compressie	Oppervlakkige, matig tot sterk exsuderende wonden. Vermindert geur, antibacteriële werkzaamheid tegen grampositieve bacteriën in geval van ulcers, decubitus wonden of fistels	Absorberend kompres: oppervlakkige, matig tot sterk exsuderende wonden. Wiek: diepe en oppervlakkige wonden, voor alle exsudatiefasen, voor geïnfecteerde wonden of wonden met infectierisico	Oppervlakkige wonden in het postoperatieve gebied, voor eerste hulp in geval b.v. van snijwonden en schaafwonden, tweedegraads brandwonden	Voor beddekking van wonden van alle typen. Vooral aanbevolen voor: snijwonden, brandwonden, chemische brandwonden, operatieve wonden als onderdeel van de eerste hulp en tracheotomie	Oppervlakkige, acute en chronische wonden B.v. ulcus cruris, diabetische voetulcers, decubitus, scheur-, snij- en schaafwonden, tweedegraads verbrandingen, splitskin-afnameplekken	Bevordert de afvoer van exsudaat. Voor de verzorging van skinafnameplekken, Ulcus Cruris, decubitus, brandwonden, snijwonden en schaafwonden
	De zachte vezelkant dient te worden bevochtigd met een type wondspoelmiddel naar keuze.	Suprasorb A Suprasorb A + Ag Suprasorb C Suprasorb Liquacel Lomatuell H Lomatuell Pro Vliwaktiv Ag wiek	Suprasorb A Suprasorb A + Ag Suprasorb Liquacel Lomatuell H Lomatuell Pro Vliwaktiv Ag wiek	Suprasorb A Suprasorb A + Ag Suprasorb Liquacel Lomatuell Pro Lomatuell H Vliwaktiv Ag wiek	Suprasorb A Suprasorb A + Ag Suprasorb Liquacel Lomatuell Pro Lomatuell H Vliwaktiv Ag wiek	Suprasorb A Suprasorb A + Ag Suprasorb Liquacel Lomatuell Pro Lomatuell H Vliwaktiv Ag wiek	Vliwaktiv Ag - Absorberend kompres: Suprasorb A Suprasorb Liquacel Lomatuell Pro Lomatuell H Vliwaktiv Ag - wiek: Vliwazell Vliwaktiv	Suprasorb X Suprasorb X +PHMB Lomatuell H Lomatuell Pro		Suprasorb P Suprasorb F Stellaline Vliwazell Vliwaktiv Vliwaktiv Ag Vliwasorb zelfklevend Vliwasorb Pro	Suprasorb P Suprasorb F Stellaline Vliwaktiv Ag Vliwaktiv Vliwazell Vliwasorb zelfklevend Vliwasorb Pro

Opmerking in geval van infectie: secundair occlusief verband alleen na besluit van arts, volgens de algemene situatie

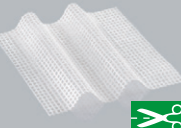Aanbevolen in exsudatie fase:

 droog
 laag
 gemiddeld
 hoog
 zeer hoog

Debrisoft® Pad

steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
10 x 10	34 321	15668762	5 / 50
13 x 20	34 323	16845390	5 / 50

Debrisoft® Lolly

steriel, individueel verpakt

REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
33 224	16187156	5 / 50

Vliwasorb® adhesive

Zelfklevend, steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	Wond kussen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
12 x 12	8,1 x 8,2	30 991	15798720	10 / 260
15 x 15	10,5 x 10,5	30 992	15798739	10 / 330
15 x 25	10,5 x 20,5	30 993	15908151	10 / 110

Vliwasorb® Pro

steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	Wond kussen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
10 x 10	6 x 6	32640	16276450	10 / 300
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	3264	16276469	10 / 300
12,5 x 22,5	8,5 x 18,5	32642	16276477	10 / 350
22 x 22	18 x 18	32643	16276485	10 / 260
22 x 32	18 x 28	32644	16276493	10 / 90

Vliwasorb® Sensitive

steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	Wond kussen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
7,5 x 7,5	5 x 5	141 820	???	10/240
12,5 x 12,5	10 x 10	141 821	???	10/160
10 x 20	7,5 x 17	141 822	???	10/160
15 x 25	12 x 22	141 823	???	10/80
20 x 20	17 x 17	141 824	???	10/80
20 x 30	17 x 27	141 825	???	10/80

Vliwazell®

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
steriel, individueel verpakt			
10 x 10	20 320	-	25 / 400
10 x 20	30 451	15399176	30 / 300
15 x 20	30 452	15399281	30 / 180
15 x 25	30 453	15399184	30 / 240
20 x 20	30 454	15399192	30 / 120
20 x 25	30 455	15405370	30 / 150
20 x 40	30 456	15399206	30 / 180

Vliwazell® Pro

steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
10 x 10	109 460	16892410	10 / 240
10 x 20	109 461	16892429	10 / 120
15 x 20	109 462	16892437	10 / 80
20 x 25	109 463	16892461	10 / 100
20 x 40	109 464	16892518	10 / 100

Vliwaktiv® Absorberende kompres met actieve kool

steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
10 x 10	20 254	14009854	20 / 400
10 x 20	20 255	14009862	20 / 200

Vliwaktiv® Ag

steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
Wiek met actieve kool en zilver			
6,5 x 10	20 700	15154289	10 / 300
10 x 10	20 701	15154300	10 / 300
10 x 15	20 702	15154327	10 / 340
Absorberend kompres met actieve cool en zilver			
10 x 10	20 705	15154343	10 / 150
10 x 20	20 706	15154351	10 / 110
20 x 20	20 707	15154386	10 / 130

Stellaline®

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
steriel, individueel verpakt			
5 x 5	36037	??	26 / 624
7,5 x 7,5	36038	??	12 / 288
10 x 10	36039	??	10 / 240
10 x 20	36045	??	5 / 120
Grote verpakking			
5 x 5	17786	??	100 / 2900
7,5 x 7,5	17787	??	100 / 2500
10 x 10	17788	??	100 / 1600
5 x 5	36047	??	400 / 2400
10 x 10	36040	??	120 / 720
10 x 20	36041	??	50 / 1200

Metalline® Kompres

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
steriel, individueel verpakt, voor OTC en voorschrift			
8 x 10	23 083	12307424	1 / 10
10 x 12	23 084	12307432	1 / 10
steriel, zak			
40 x 60	23012	??	1 / 100
60 x 80	23010	??	1 / 100
80 x 120	23011	??	1 / 100

Metalline® Drainkompres

steriel, individueel verpakt, in dispenserdoos. Met variabele diameter opening van 4.5 tot 11 mm; voor 9-30 Ch (Charrière)

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
6 x 7	23 093	12201510	50 / 600

Metalline® Tracheo-kompres

steriel, individueel verpakt, en dispenserdoos. Met variabele diameter opening van 12 tot 19 mm; voor 31-50 Ch (Charrière)

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
8 x 9	23 094	12201537	50 / 600

Lomatuell® H

steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
5 x 5	23 314	1685197	10 / 360
10 x 10	23 315	13238302	10 / 120
10 x 20	23 316	13238310	10 / 120
10 x 30	23 317	13238329	10 / 80
10 x 10	23 318	13238337	50 / 450

Lomatuell® Pro Gelvormend contactnetwerk

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
5 x 5	30870	16065174	10 / 360
10 x 10	30871	16065182	10 / 120
10 x 20	30872	16065190	10 / 120
10 x 30	30873	16065204	10 / 80
10 x 10	30874	16065212	50 / 450
10 x 40	220 000	16967461	10 / 120
15 x 20	220 001	16967453	15 / 50
15 x 30	220 002	16967445	5 / 55

Opmerking:

Debrisoft en **Debrisoft Lolly**: werken samen voor u bij debridement van oppervlakkige tot diepe wonden. Zorg ervoor dat u de producten bevochtigt volgens de instructies vóór gebruik.

Basiszieltetherapie: compressie met **Rosidal** of entlasting of metaboelische voorschrift.