

Debrisoft® Lolly

De gouden standaard voor mechanisch débridement.



Debrisoft Lolly is ontwikkeld voor het débridement van diepe wonden, moeilijk te bereiken wondlocaties en voor wonden die chirurgisch-invasief van oorsprong zijn.

Het innovatieve product van L&R is zeer eenvoudig te hanteren en maakt een bijzonder efficiënt débridement mogelijk.

Toepassingsgebieden


- débridement van diepe – ook chirurgisch-invasieve – tot oppervlakkige wonden zoals:
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ arteriële en veneuze ulcera
 - ◆ decubitus
 - ◆ postoperatief secundair genezende wonden
 - ◆ traumata en brandwonden

Eigenschappen

- de stick met monofilamentvezels is een innovatief hulpmiddel en eenvoudig te hanteren
- débridement van diepe wonden en moeilijk te bereiken wondlocaties
- flexibel, ergonomisch en moeilijk breekbaar
- de vezeluiteinden verwijderen effectief débris en exsudaat uit de wond
- het vezelverband neemt de losgekomen aanslag en keratosen op en verwijdert ze
- degelijke bevestiging van het 'lolly'-gedeelte, gering risico voor de patiënt op onverwacht loslaten daarvan

Debrisoft® Lolly

De gouden standaard voor mechanisch débridement.

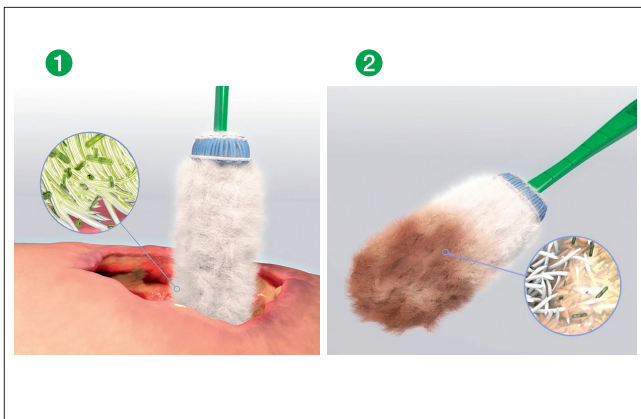

Werking

- 1 Reinig de wond en/of moeilijk te bereiken wondlocaties met de zachte vezelkop van de bevochtigde Debrisoft Lolly onder zachte druk.
- 2 Het vezelverband neemt de losgekomen aanslag en keratosen op en houdt ze vast.

Voordelen

- hoog gebruikscomfort en uitstekende débridementresultaten
- bijzonder effectief débridement
- snel zichtbare resultaten, al binnen 2–4 minuten
- Debrisoft Lolly is intuïtief toe te passen
- hoge gebruikerstevredenheid
- eenvoudig te gebruiken

Productsamenstelling

De kop van de Debrisoft Lolly bestaat uit monofilament-polyestervezel en is omnaaid met een blauwe röntgencontrastdraad van polypropyleen (bevat bariumsulfaat en polyester). De binnenkant van de kop is gecoat met polyacrylaat. De kop is aan een steel van polypropyleen vastgenaaid.

Opmerking

- product voor débridement, blijft niet achter op de wond
- kan indien nodig bij elke verbandwisseling worden gebruikt

Tip

- leidt ook bij sterk keratotische, necrotisch beleg tot een bijzonder goed resultaat als deze eerst autolytisch behandeld is
- de zachte vezelkant kan met elke gangbare wondspoeloplossing worden bevochtigd

Debrisoft® Lolly

steriel, afzonderlijk verpakt

REF	Z-Indexnummer	SC/TC
33 224	16 187 156	5/50