



People.Health.Care.

VENOSAN® - Therapeutische elastische vlakbrei kousen

Optimale pasvorm voor oedeembestrijding.

Therapeutische elastische vlakbrei kousen voor de behandeling van chronisch oedeem en -lymfoedeem.



Therapeutische elastische vlakbrei kousen van VENOSAN®

Altijd de juiste keuze.

Met de collectie therapeutische elastische kousen in vlakbrei voor vasculaire en lymfatische aandoeningen compleetert Venosan het assortiment aan compressieproducten. Het kiezen van de juiste kous is zo eenvoudig mogelijk gemaakt door gemakkelijk leesbare, ruime confectiemaattabellen, de mogelijkheid maatwerk te bestellen en het gebruiksgemak van de vlakbrei compressieproducten.

L&R Venosan heeft als doel artsen en aanmeters zo goed mogelijk te ondersteunen in het bieden van adequate zorg, passend bij de indicatie, de vorm en de lichaamsbouw van iedere individuele patiënt.

Wij vinden dat adequate, klinisch effectieve behandeling en advies gemakkelijk toegankelijk zouden moeten zijn voor een ieder (arts, aanmeter en patiënt) die zich bezig houdt met de verzorging van vasculaire en lymfatische aandoeningen. Dat zij zich gesteund voelen - niet slechts op bepaalde momenten - maar een heel leven lang.

Wij noemen dit:

Support for Life 

Waarom kiezen voor VENOSAN®?

- therapeutische elastische vlakbrei kousen
 - hoogwaardig ontwerp, materiaal en productie
 - RAL-gecertificeerd
 - Oeko-Tex Standard 100
- een compleet aanbod van arm- & beenkousen
- 3 kwaliteiten - de mogelijkheid om te kiezen wat het beste aansluit bij de behoeften van uw patiënten



VENOSAN® Vlakbrei

Kies het materiaal dat het beste aansluit bij de behoeften van uw patiënt.

VENOSAN therapeutische elastische vlakbrei kousen worden vervaardigd met behulp van geavanceerde garentechnologiën, wat zal resulteren in een hoge therapietrouw van de patiënt. Het complete assortiment van Venosan TEK wordt conform EU-normen geproduceerd in Europa en beslaat verschillende kwaliteiten en stijlen. Zo heeft u de mogelijkheid om de meest geschikte kous voor uw patiënt te kiezen.



De drie verschillende kwaliteiten in VENOSAN vlakbrei bieden u de keuze om precies het juiste product voor te kunnen schrijven:

VENOSAN® Soft

Biedt door gebruik van heel zacht materiaal een zeer hoog draag-comfort en daarmee therapietrouw voor de patiënt met tegelijkertijd effectieve compressie:

- extreem zacht en duurzaam
- gemakkelijk aan- en uit te trekken
- latexvrij
- klasse 1, 2 en 3
- beschikbaar in maatwerk en confectie
- lage tot gemiddelde stiffness

VENOSAN® Pro

Biedt de ideale stiffness ter voorkoming van chronisch oedeem, zonder in te leveren op draagcomfort en daarmee therapietrouw voor de patiënt:

- glad en duurzaam
- goede oedeempreventie
- gemakkelijk aan- en uit te trekken
- klasse 2 en 3 beschikbaar in maatwerk en confectie
- middelhoge stiffness


VENOSAN® Strong

Biedt de hoogste graad van stiffness, ideaal voor patiënten die een hoge mate van oedeempreventie nodig hebben:

- glad en duurzaam
- relatief ademend
- hoge mate van oedeempreventie
- latexvrij
- Venosan Strong 3 en 4 middelhoge stiffness
- Venosan Strong 4S hoge stiffness

Waarom is de mate van stiffness zo van belang?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de stiffness van compressieproducten een belangrijke rol speelt bij de hemodynamische werkzaamheid ervan. Stijvere textielsoorten hebben korte-rek-eigenschappen met een lage rustdruk en hogere werkdruk. Dit is een cruciale factor bij het voorspellen van de effectiviteit en therapietrouw voor patiënten. Hoe hoger de stiffness van een stof, hoe groter het masserende effect tijdens beweging.*

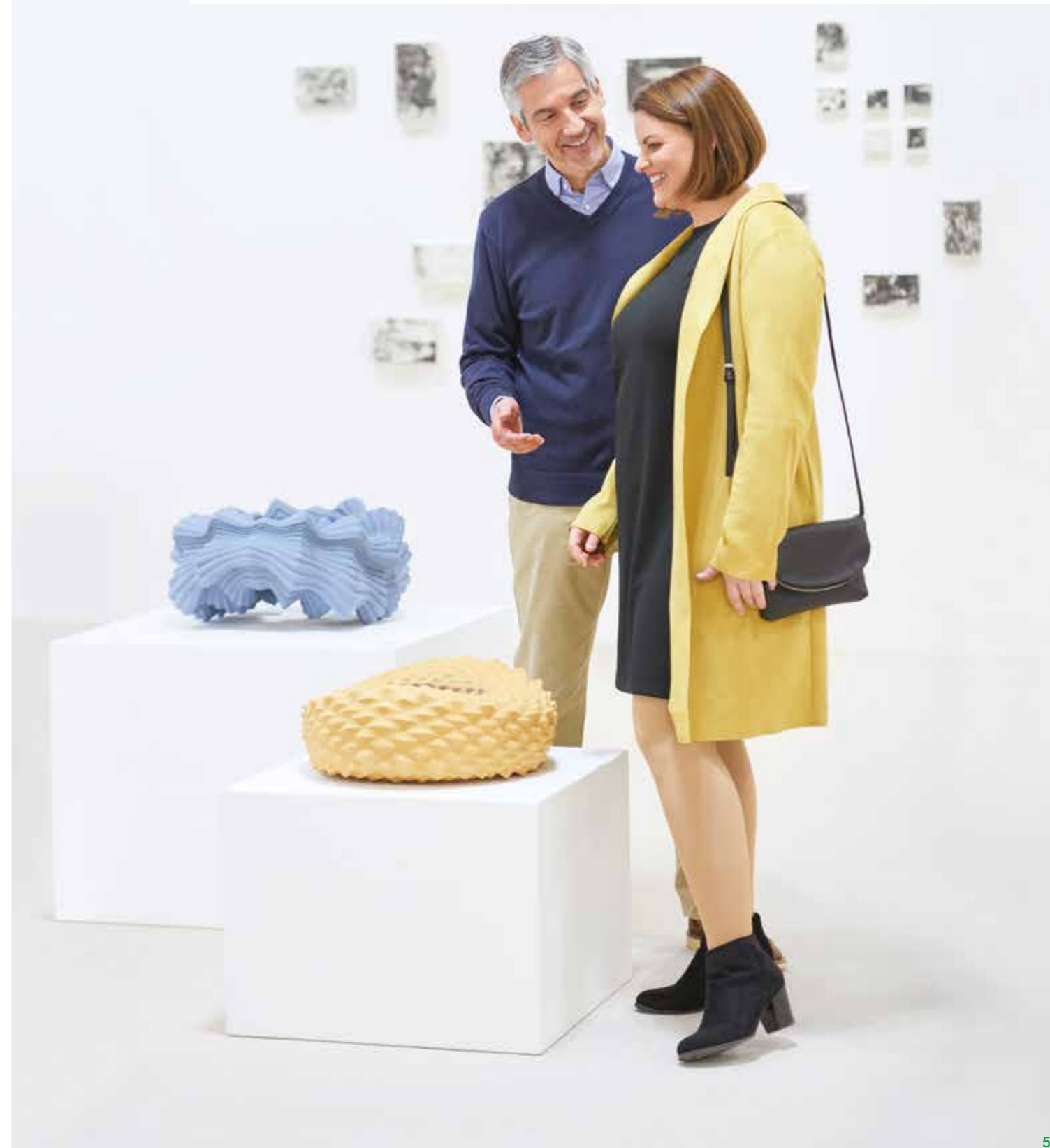

* Ehmann, S.; Bjork, R. (2019) S.T.R.I.D.E. Professional Guide to Compression Garment Selection for the Lower Extremity.
Reich-Schupke, S.; Stücker, M. (2019) Round knit or flat knit compression garments for maintenance therapy of lymph-edema of the leg?
- Review of the literature and technical data.

VENOSAN® Vlakbrei

Wanneer welk product?

Stiffness	Klasse 1 18-21 mmHg	Klasse 2 23-32 mmHg	Klasse 3 34-46 mmHg	Klasse 4 > 49 mmHg
Laag	Soft 1	Soft 2		
Gemiddeld		Pro 2	Soft 3 Pro 3 Strong 3	Strong 4
Hoog				Strong 4S



Het VENOSAN® vlakbrei assortiment

4 compressieklassen, 3 kwaliteiten, 1 passend product.

KLASSE 1

VENOSAN® **Soft 1/2**

- wanneer een zachte klasse 1 of 2 kous met lage stiffness is geïndiceerd
- ook bij een kwetsbare huid t.g.v. ouderdom of medicatie
- in geval van latexallergie of overgevoeligheid
- bij geen of weinig oedeem

KLASSE 2

VENOSAN® **Pro 2**

- wanneer een wat steviger klasse 2 kous met middelhoge stiffness is geïndiceerd
- bij een 'normale' huid en normale klasse 2 indicaties
- bij enig oedeem

KLASSE 3

VENOSAN® **Soft 3**

- wanneer een klasse 3 zachte kous met middelhoge stiffness is geïndiceerd
- ook bij een kwetsbare huid t.g.v. leeftijd of medicatie
- bij weinig tot matig oedeem
- in geval van latexallergie of overgevoeligheid

VENOSAN® **Pro 3**

- wanneer een stevige klasse 3 kous met iets meer dan gemiddelde stiffness is geïndiceerd
- bij een 'normale' huid en normale indicaties voor klasse 3
- bij matig oedeem

VENOSAN® **Strong 3**

- wanneer een klasse 3 kous met gemiddelde stiffness is geïndiceerd
- bij ernstige indicaties
- standaardoptie: verkorte wreef
- in geval van latexallergie of overgevoeligheid

KLASSE 4

VENOSAN® **Strong 4/4S**

- 'harde' werker voor zeer ernstige indicaties
- standaardoptie: verkorte wreef
- in geval van latexallergie of overgevoeligheid

VENOSAN® Vlakkbrei

Overzicht van compressiekousen voor de onderste ledematen.



De Venosan therapeutische elastische vlakbrei kousen worden gekenmerkt door speciaal verstevigde gedeelten waarbij in maatwerk verschillende speciale afwerkingen bij gewrichten en randen mogelijk zijn. Het maatwerk assortiment is verkrijgbaar met een normale en Micro Dot siliconenband.

VENOSAN® Soft Maatwerk vlakbrei assortiment

	Klasse 1 18-21 mmHg	Klasse 2 23-32 mmHg	Klasse 3 34-46 mmHg
Kleuren	● ●	● ●	● ●
Stiffness	Laag	Laag	Middel

VENOSAN® Pro Maatwerk vlakbrei assortiment

	Klasse 2 23-32 mmHg	Klasse 3 34-46 mmHg
Kleuren	● ●	● ●
Stiffness	Middel	Middel


VENOSAN® Strong Maatwerk vlakbrei assortiment

	Klasse 3 34-46 mmHg	Klasse 4 > 49 mmHg	Klasse 4S > 49 mmHg
Kleuren	●	●	●
Stiffness	Medium	Medium	Hoog

VENOSAN® maatwerk vlakbrei assortiment

Overzicht van koustypen voor de onderste ledematen.

Deze zijn beschikbaar in de kwaliteiten VENOSAN® Soft, Pro en Strong.

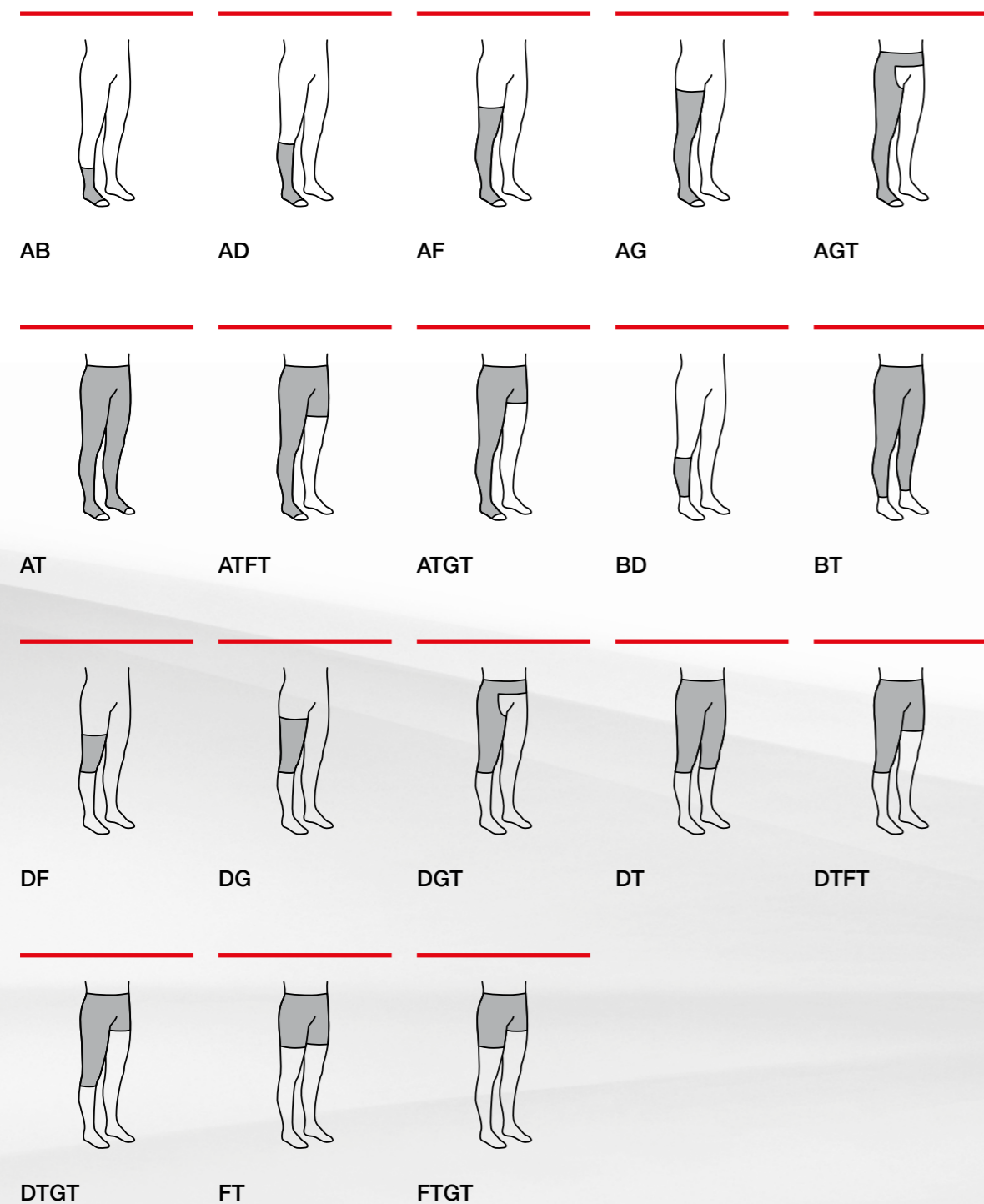

VENOSAN® vlakbrei confectietabel en confectie assortiment

Confectietabel VENOSAN® Soft 2, Pro 2 en Pro 3 vlakbrei beenkousen.

omvang (cm)	small c-	small	medium c-	medium	large c-	large	x large c-	x large
cD	25 - 30	30 - 35	28 - 33	33 - 38	32 - 38	36 - 42	37 - 43	41 - 47
cC	26 - 31	31 - 36	29 - 34	34 - 39	33 - 39	37 - 43	38 - 44	42 - 48
cB1	21,5 - 24,5	24 - 27	23,5 - 27	26 - 29,5	27 - 30,5	29 - 32,5	29 - 33	31 - 35
cB	19 - 21		21 - 23		23 - 25,5		25,5 - 28,5	
cY	29 - 33		31 - 34		32 - 36		34 - 38	
cA	20,5 - 22,5		21,5 - 23,5		23 - 25		24 - 27	

lengte (cm)	kort	normaal	lang
ID	36 - 38	39 - 41	42 - 44
IA	16 - 18	17 - 19	18 - 20
IZ	22 - 24	23 - 26	25 - 28

Confectie assortiment VENOSAN® Soft 2, Pro 2 en Pro 3 vlakbrei beenkousen.

	kleur	teenstuk	AD
VENOSAN® Soft 2	● beige ● zwart	open en gesloten	○
VENOSAN® Pro 2	● beige ● zwart	open en gesloten	○
VENOSAN® Pro 3	● beige	open	○

Verkrijgbaarheid siliconenband.

	AD siliconenband 3 cm bij lengte			AD siliconenband 5 cm bij lengte		
	kort	normaal	lang	kort	normaal	lang
VENOSAN® Soft 2	○	-	-	-	○	○
VENOSAN® Pro 2 en 3	-	-	-	○	○	○

AD: kniekous

VENOSAN® Vlakkbrei

Overzicht van compressiekousen voor de bovenste ledematen.



Platte randen en speciale afwerking van gewrichtsdelen verhogen het draagcomfort.



VENOSAN® Soft

Maatwerk vlakbrei assortiment

	Klasse 1 18-21 mmHg	Klasse 2 23-32 mmHg	Klasse 3 34-46 mmHg
Kleuren	● ●	● ●	● ●
Stiffness	Laag	Laag	Middel

VENOSAN® Pro


Maatwerk vlakbrei assortiment

	Klasse 2 23-32 mmHg	Klasse 3 34-46 mmHg
Kleuren	● ●	● ●
Stiffness	Middel	Middel




VENOSAN® Vlakkbrei

Overzicht van koustypen voor de bovenste ledematen.

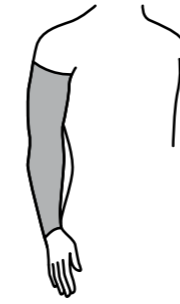


CG

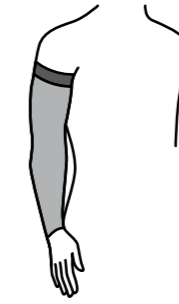

CG met siliconenband



AG + duimopening

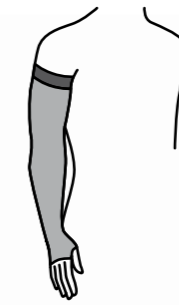

AG met siliconenband
+ duimopening



AC1 – handschoen

In de VENOSAN Pro zijn alle modellen voor de bovenste ledematen beschikbaar.
In de VENOSAN Soft alléén de CG en CG met siliconenband.



People.Health.Care.


Support for Life



Wij staan voor u klaar met onze 'Support for Life'. Ons doel is te luisteren, te helpen en mogelijkheden te bieden om patiënten zelfstandig met hun aandoening om te leren gaan en deze effectief te behandelen.



Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher Nederland · Antennestraat 86-B · 1322 AS Almere, Nederland

VENOSAN® is een gedeponeerd handelsmerk van
SWISSLASTIC AG, St. Gallen, Switzerland - an  Company

For more info visit
www.SupportforLife.com

